

Salitair

Мы рады, что вы выбрали один из наших продуктов и благодарим вас за оказанное нам доверие. Наша задача полностью удовлетворить требования наших клиентов, предлагая им новейшую продукцию для Здоровья и красоты ООО «Витта-Технолджи»

ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ СОЛЯНЫХ ШАХТ У ВАС ДОМА!

Положительный лечебный эффект соляных шахт был впервые документально подтвержден в Польше в 19 веке. Он стал постепенно применяться при лечении респираторных заболеваний, и все больше и больше людей избавлялось от своих симптомов во время лечения в соляных шахтах.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ SALITAIR?

Salitair – это ручной ингалятор, содержащий кристаллы каменной соли из соляной шахты Клодава в Польше. Данное устройство было разработано с целью создания микроклимата лечебных соляных шахт в домашних условиях. Оно состоит из нескольких элементов, указанных на рисунке 2. Мундштук и верхний фильтр закреплены с помощью байонетного крепления и могут извлекаться для очистки и замены кристаллов каменной соли.

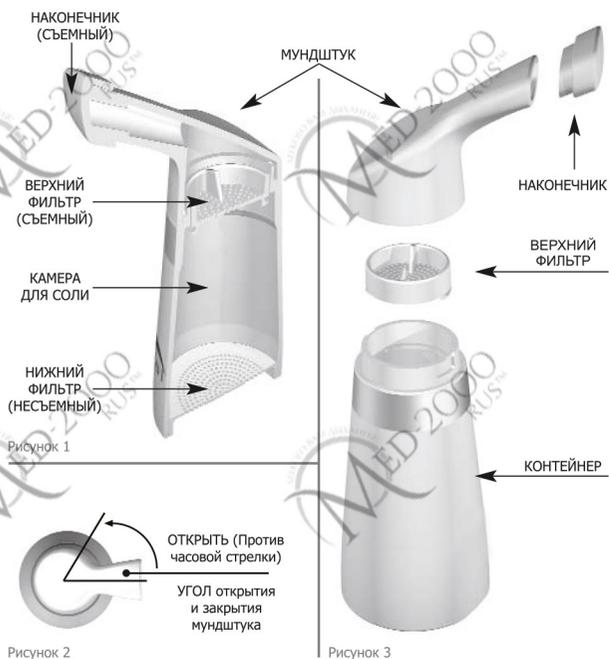


Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

ПРИНЦИП РАБОТЫ SALITAIR

При обычном вдохе воздух поступает в устройство, проходит через кристаллы соли в контейнере и затем поступает в дыхательную систему. Влажности воздуха достаточно для его обогащения мелкими частичками соли при прохождении воздуха через соляные кристаллы. Таким образом, создается микроклимат лечебных соляных шахт, который очищает дыхательную систему.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При покупке устройство Salitair не содержит кристаллы. Перед использованием необходимо ополоснуть устройство теплой водой и тщательно просушить. Заполните устройство кристаллами только после его полного высыхания. Снимите мундштук и верхний фильтр, как показано на рисунке 3. Поместите в контейнер приблизительно 60-70 граммов предоставленных кристаллов каменной соли, что составляет около 1/3 предоставленного количества соли. После повторной сборки устройство готово к использованию. Если устройство не используется, установите наконечник на мундштук (Рисунок 1) для герметичного закрытия устройства.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ SALITAIR

При использовании устройства дыхание должно быть нормальной интенсивности. Поместите мундштук между губ, аккуратно вдохните ртом и выдохните носом. НЕ ВЫДЫХАЙТЕ В УСТРОЙСТВО. Когда начнется процесс очищения возможно появление кашля или чихания. Рекомендуется использовать ингалятор в течение 15-25 минут ежедневно. Чтобы достигнуть лучшего результата, используйте ингалятор круглый год.

ЗАМЕНА КРИСТАЛЛОВ СОЛИ

Рекомендуется ежемесячно заменять кристаллы соли. Для замены кристаллов соли просто снимите мундштук и верхний фильтр, как показано на рисунке 3. Не откручивайте мундштук дальше, чем показано на рисунке 3 (как при закрытии, так и при открытии мундштука), так как это может повредить байонетный механизм. Извлеките «старые» кристаллы соли. Наполните контейнер требуемым количеством новых кристаллов соли (приблизительно 60-70 грамм). Удостоверьтесь, что верхний фильтр был установлен перед подсоединением мундштука. После повторной сборки ингалятор Salitair готов к использованию.

ОЧИСТКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Используйте только влажную ткань. Не допускается попадание воды внутрь устройства.

ОЧИСТКА ПЕРЕД НАПОЛНЕНИЕМ

После опустошения контейнера ингалятор можно мыть под проточной теплой водой. Не допускается использование каких-либо чистящих средств. Не мойте устройство в посудомоечной машине. Заполните контейнер кристаллами каменной соли только после полного высыхания устройства.

Хранение

Храните Salitair и соль в сухом прохладном месте, вдали от яркого света и сильных запахов.

Предупреждения:

- Прочтите инструкцию перед использованием.
- Предназначено для использования только одним человеком.
- Содержит мелкие частицы. Не глотать!

Никакая продукция или рекомендация не могут заменить собой текущее лечение, диагностировать или вылечить какое-либо заболевание. Проконсультируйтесь с врачом в случае сомнений относительно применения продукта в Вашем состоянии. Меди-Директ Интернешнл Лтд. не несет никакой ответственности за прямой, специальный, косвенный, случайный или второстепенный ущерб, нанесенный при использовании, неправильном использовании или обращении с данным продуктом. Ответственность в отношении данного продукта ограничена только его ценой.

Фирма-импортер: ООО «Витта-Технолджи»
119361, г. Москва, Большая Очаковская улица, 47 а, Тел.: +7 (495)981-88-73, 8 (800) 550-97-92, www.salitair.ru

Salitair