

ПОРТАТИВНЫЙ
МЕШ ИНГАЛЯТОР

Air Pro



Lotus N.L.B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,
2595AA, The Hague, Netherlands.

Примечание

1. Добавляйте жидкость до включения устройства.
2. Не используйте медицинские лекарства, содержащие масло или распыленную жидкость.
3. Соблюдайте рекомендации врача по выбору лекарств и режиму их применения.
4. После каждого применения очищайте устройство.
5. После каждого использования насухо вытирайте устройство, чашу для лекарства и комплектующие.
6. Не касайтесь мембраны острыми или твердыми предметами в случае обнаружения неисправности.
7. Зарядите устройство в течение 30 минут до первого применения.

Предупреждения перед использованием и меры безопасности:

1. Посоветуйтесь с вашим врачом при выборе прибора нужного типа для проведения ингаляции.
2. Храните прибор вдали от детей и людей, не умеющих с ним обращаться.
2. Не используйте 100% эфирные масла.



Air Pro - портативный переносной высокотехнологичный ультразвуковой небулайзер, предназначен для лечения и профилактики различных заболеваний дыхательных путей. Принцип работы основан на технологии вибрирующей сетки-мембраны, которая сохраняет частицы ингаляционной жидкости, не давая им распадаться. Это обеспечивает проникновение препарата в легкие пациента. Прибор работает на заданной частоте, при которой молекулы лекарства не распадаются и сохраняют свои лечебные свойства. Благодаря этому в прибор можно залить различные лекарственные препараты, том числе гормоны и антибиотики.

Аэрозольная небулайзерная терапия рекомендована при следующих заболеваниях дыхательных путей:

1. Профилактика заболеваний дыхательных путей
2. Бронхиты
3. Ларингиты, тонзилиты, синуситы
4. Трахеиты
5. Респираторные инфекции
6. Бронхиальная астма
7. Пневмония
8. Другие заболевания дыхательных путей.
9. Легочные инфекции.

Противопоказания:

Ингаляции противопоказаны при:

1. Повышении температуры выше 37,5 С.
2. При носовых кровотечениях.
3. При заболеваниях легких и сердца с явлениями выраженной сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточности.

Предупреждения перед использованием и меры безопасности:

1. Посоветуйтесь с вашим врачом при выборе прибора нужного типа для проведения ингаляции.
2. Храните прибор вдали от детей и людей, не умеющих с ним обращаться.
3. Не используйте 100% эфирные масла.

Руководство по эксплуатации



1 Чтобы открыть крышку, поверните ее против часовой стрелки по указателю



2 Добавьте необходимое количество жидкого лекарства. Следите, чтобы количество не превышало указатель на шкале



3 Чтобы закрыть крышку, поверните ее по часовой стрелке



4 Подсоедините маску или мундштук



5 Начните ингаляцию

Запустите аппарат перед распылением, слегка встряхните уровень, чтобы раствор полностью закрыл устройство распылителя.

Если зеленая лампочка мигает трижды, когда жидкости достаточно, нажмите кнопку один раз, чтобы продолжить работу.

Технические характеристики:

Модель: Air Pro
Электротяготение: 4,8 В пост. тока (встроенная литиевая батарея) или 5,0 В пост. тока с адаптером переменного тока
Размер частиц: Масс-медианный аэродинамический диаметр < 5 мкм
Потребляемая мощность: < 3,0 Вт
Скорость испарения: 0,15 мл/мин - 0,90 мл/мин
Объем чаши для лекарства: 10 мл (макс)
Рабочая частота: 130 кГц ±10 кГц
Температура воды в чаше: <30°C
Уровень шума: на расстоянии 1 м - 20 дБ
Размеры/масса изделия: 54 мм (д) x 38 мм (ш) x 98 мм (в) / 104 г
Условия эксплуатации: Температура: 5°C-40°C
Относительная влажность: ≤80% Без конденсации
Атмосферное давление: 86,0 мпн / 106,0 кПа
Условия хранения/транспортировки: Температура: от -10°C до 50°C
Относительная влажность: ≤80% Без конденсации
Атмосферное давление: 86,0 - 106,0 кПа

Гарантия

Условия ГАРАНТИИ действительны только при наличии руководства по эксплуатации с гарантийным талоном, а также чека или счёт - фактуры.
Срок гарантии - 5 лет с даты продажи.
По вопросам ремонта, обращаться непосредственно в Центр Технического Обслуживания. Адрес и телефоны ЦТО указаны в гарантийном талоне, а также на последней странице

Сменные части и дополнительное оборудование:

При неисправности прибора свяжитесь с службой технического обслуживания клиентов или с официальным дистрибутором.
По вопросам сменных частей устройства обращайтесь к своему официальному дистрибутору.

Руководство по очистке

4. Чистка прибора

1. Поверните комплектующие по часовой стрелке чтобы раскрутить и извлечь их.
2. Откройте крышку и очистите чашу от остатка жидкого лекарства.
3. Добавьте необходимое количество теплой воды (не выше 40°C). Не используйте дистиллированную воду или воду многократной очистки.
4. Затяните крышку.
5. Вытирайте устройство чистой медицинской марлей после очистки небулайзера. Не касайтесь центральной области мембраны, чтобы не повредить ее.




2. Регулярная очистка



1. Нажмите кнопку и вытащите чашу для лекарства.



Очистите чашу для лекарства изнутри

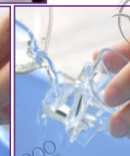

Очистите подключение распылителя снаружи



Очистите подключение распылителя изнутри.

Несколько раз промойте снаружи и изнутри чашу для лекарства и подключение распылителя очищенной водой (с температурой ниже 40°C). Высушите капли жидкости чистой медицинской марлей. Не касайтесь центральной области мембраны, чтобы не повредить ее. Положите на место устройство и комплектующие. Хранить в соответствии с инструкцией, конкретным продуктом.

Совет: Очистка с использованием 3 капли чистой воды и 1 капли белого уксуса даст наилучший результат.

Примечание: Иллюстрация дана исключительно для справки. Цвет устройства может быть другим без предварительного уведомления. Более точная информация предоставляется только в соответствии с конкретным продуктом.

Комплектация прибора



Описание прибора



Примечание: Перед зарядкой убедитесь, что подключенная розетка нормально заряжает

Примечание: Прибор заряжается независимо. Не заряжайте его совместно с другими электронными устройствами.

Внимание: следите за чистотой всех контактных поверхностей и насухо вытирайте их после использования.

Производитель:

FEELIFE HEALTH INC.
Room 1903, Building A, No.9 Furong Road, Tantau Community, Songgang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518104 Guangdong, China.

ФИЛЛАЙФ ХЕЛС ИНК.
Оф. 1903, Здание А, Фурунг роуд 9, округ Танту, подгород Сунган, район Баоан, Шеньжень 518104 Гуандун, Китай